



surface disinfect universal tissues

NOVINKA

Bezalkoholové ubrousky k čištění a dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků.



Vaše výhody

- rychlá a široká účinnost
- dezinfikovatelná plocha: cca 0,2 m²/ubrousek

- obzvláště snášenlivé pro materiály
- koncepce barev a názvů za účelem minimalizace záměn



Oblasti použití

K čištění a dezinfekci ploch citlivých na alkohol (podle nařízení o biocidních přípravcích) a zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích.

Návod k použití

Plochy důkladně otřete, zajistěte důkladné smočení ošetřované plochy a nechte působit. Doporučujeme používat rukavice. Po použití ubrousek odevzdejte k likvidaci odpadu. Nepoužívejte k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Abyste zabránili vyschnutí ubrousků, balení po použití opět zavřete.

Znalecky posouzená účinnost¹

Účinnost proti	Prohlášení o účinnosti dezinfekčního prostředku na plochy	Zkušební metoda	Doporučené použití / doba působení
Grampozitivní a gramnegativní bakterie, včetně kmenů rezistentních na antibiotika	baktericidní	EN 13727	30 s
		EN 13697	5 min.
Kvasinky	levurocidní	EN 13624 EN 13697	5 min.
Obalené viry	omezeně virucidní podle DVV/RKI	DVV/RKI	30 s
Rotaviry	účinnost proti rotavirům	EN 14476	30 s
Polyomaviry SV 40	účinnost proti polyomavirům	EN 14476	1 min.
Dosah / dezinfikovatelná plocha na jeden ubrousek			0,2 m ²

Testovaná snášenlivost materiálů:

- PVC, pryž EPDM, Makrolon®, Plexiglas®, polysulfonové sklo (Tecason®), silikon, latex, polyuretan
- Mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel

Trvanlivost po otevření: 1 měsíc

Dosah/dezinfikovatelná plocha: cca 0,2 m²/ubrousek

Seznamy: Seznam VAH, seznam znaleckých posudků ÖGHMP (Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu)

Složení: Účinné složky ve 100 g roztoku: alkyl(C12-16)dimethylbenzylamoniumchlorid 0,4 g, didecyltrimethylamoniumchlorid 0,4 g

Fyzikálně-chemické údaje napouštěcího roztoku:

Hustota (20 °C): cca 1 g/cm³
Hodnota pH: cca 8

Zvláštní upozornění: Používejte dezinfekční prostředky na plochy opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Informace pro objednání

surface^{disinfect} universal tissues

Obsah balení	REF	Prodejní jednotka
1 dóza à 100 ubrousků à 22,5 x 13,8 cm	34 572	1/12 dóz

1) testováno s roztokem účinné látky

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256 · CZ-684 01 Slavkov u Brna